



### Gebrauchsanweisung

Überprüfung der Ultraschallenergie  
mit SonoCheck.

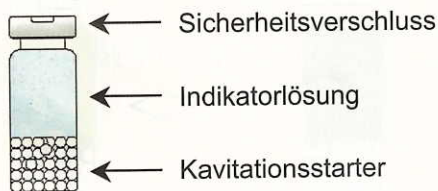

### SonoCheck

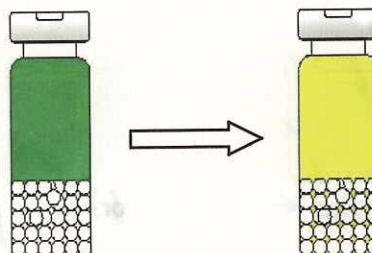

1. Für den Routinetest oder die Validierung des Ultraschallbeckens werden die SonoCheck, zwischen die Beladung, in den Instrumentenkorb eingelegt und das gewünschte Programm gestartet. Genaue Informationen entnehmen sie bitte der **Reinigungskontrollanleitung**.
2. Nach Programmende wird SonoCheck auf Farbänderung von blaugrün nach gelb überprüft. Für ein positives Ergebnis muß der Test, während des Programms, vollständig nach gelb umschlagen.
3. Die für den Farbumschlag nötige Zeit kann zusätzlich Information über die Ultraschallenergie liefern.
4. Der **Troubleshooting Guide** hilft bei unbefriedigendem Ergebnis.
5. Das Ergebnis wird in das **SonoCheck Logbuch** eingetragen.

**INFO:** Zur Kontrolle der chemischen Reinigungsleistung des Prozesses wird die zusätzliche Verwendung des TOSI-LumCheck Systems empfohlen. Wegen der hohen Temperatur während der Trocknung soll SonoCheck nicht in Waschdesinfektionsautomaten eingesetzt werden.

**LAGERUNG:** Bei 2°C - 25°C in der SonoCheck-Box aufbewahren  
Vor Licht und Hitze schützen

**INHALT:** 30 Tests

**HALTBARKEIT:** Siehe Aufdruck

**Hersteller:**  
PEREG GMBH  
Porschestra. 12  
D-84478 Waldkraiburg