

# Plan de désinfection en milieu podologie / cosmétique / ongles / tatouage / piercing / coiffeur

|                                                                                    | Quoi                                                                                                                        | Avec quoi                                                                                                                     | Quand                                                                                                                        | Comment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Préparation de la solution                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Lavage des mains                                                                                                            | <b>esemtan® wash lotion</b>                                                                                                   | Avant de commencer à travailler, après le travail, après être allé aux toilettes, lorsque les mains sont visiblement sales   | Avant de savonner les mains, les mouiller à l'eau tiède (pas d'eau chaude), appliquer la lotion de lavage et la répartir sur toute la surface des mains, y compris les espaces interdigitaux, pendant environ 10 secondes. Rincer abondamment et sécher avec une serviette jetable douce.                                                                                      | Lotion de lavage prête à l'emploi. A utiliser de la même manière que les solutions usuelles                                                                                         |
|    | Désinfection des mains                                                                                                      | <b>desderman® care / gel, desmanol® pure / gel</b>                                                                            | Avant et après le traitement en cas d'encrassement visible, avant et après l'utilisation des gants                           | <u>Désinfection hygiénique des mains</u> : frictionner les mains pendant 30 secondes<br><u>Désinfection chirurgicale des mains</u> : frictionner les mains pendant 90 secondes                                                                                                                                                                                                 | Solution prête à l'emploi<br>Pas de dilution aqueuse                                                                                                                                |
|    | Soins des mains<br>Protection des mains                                                                                     | <b>esemtan® skin lotion, sensiva® protective cream</b>                                                                        | Avant une pause prolongée, à la fin d'une tâche                                                                              | Appliquer la lotion ou la crème protectrice sur le dos des mains sèches et propres après les avoir lavées et/ou désinfectées, répartir la crème d'abord sur le dos puis sur la paume des mains.                                                                                                                                                                                | Lotion pour les mains prête à l'emploi                                                                                                                                              |
|    | Désinfection de la peau                                                                                                     | <b>kodan® forte inco./colo., octeniderm®</b>                                                                                  | Avant toute intervention chirurgicale, injection et ponction                                                                 | Imprégner la région cutanée concernée de désinfectant et laisser agir.<br><b>Injections: 15 secondes. Ponctions: 60 secondes</b>                                                                                                                                                                                                                                               | Solution prête à l'emploi<br>Pas de dilution aqueuse                                                                                                                                |
|    | Désinfection des muqueuses, des plaies et de la peau, brûlures                                                              | <b>octenisept®</b>                                                                                                            | Avant toute investigation, diagnostique et intervention chirurgicale<br>Pour le traitement des plaies                        | Appliquer à l'aide de compresses, humecter toute la surface à désinfecter et <b>laisser agir pendant 1 minute.</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | Solution prête à l'emploi<br>Solution aqueuse                                                                                                                                       |
|    | Traitement des plaies                                                                                                       | <b>octenilin® Solution de rinçage des plaies, octenilin® Gel pour les plaies</b>                                              | Pour le nettoyage, l'humidification et la décontamination de plaies encroutées, contaminées et chroniques                    | Rincer intensivement la plaie pour éliminer les nécroses. Ensuite traiter la plaie avec le gel pour les plaies et, si nécessaire, la couvrir et l'emballer à l'aide de pansements, gazes ou compresses                                                                                                                                                                         | Solution prête à l'emploi.<br>Se conserve une fois ouvert:<br>– <b>octenilin®</b> Solution de rinçage des plaies: 8 semaines<br>– <b>octenilin®</b> Gel pour les plaies: 6 semaines |
|    | Instruments généraux (par ex. pincettes, ciseaux, pinces)                                                                   | <b>gigasept® instru AF</b>                                                                                                    | Après chaque usage                                                                                                           | Après avoir immergé les instruments pendant <b>30 minutes</b> , nettoyer mécaniquement, rincer puis stériliser le cas échéant. <b>La concentration / le temps d'action conformément aux normes EN / prEN sont:</b><br><b>3,0 % – 15 minutes 2,0 % – 30 minutes 1,5 % – 60 minutes</b><br>Utilisation des ultrasons: 3,0 % / 5 minutes (durée de vie de la solution 1 jour).    | <u>Solution de désinfection à 2,0 %</u><br>20 ml de <b>gigasept® instru AF</b> et 980 ml d'eau<br>Respecter le temps de réaction et de stabilité du produit.                        |
|   | Instruments rotatifs fraises en acier et en carbure, fraises diamantées                                                     | <b>rotasept®</b>                                                                                                              | Immédiatement après chaque traitement                                                                                        | Procédé à bain en bac de trempage, ne pas rincer, essuyer, ou dans un bain à ultra-sons, ne pas rincer, essuyer.<br>Si une stérilisation est nécessaire, rincer et essuyer au préalable.                                                                                                                                                                                       | Récipient pour instruments rotatifs: non diluée<br>Avec ultrasons: non diluée<br>Durée de conservation de la solution: 1 jour                                                       |
|  | Désinfection rapide alcoolisée de produits médicaux, d'appareils, de mobilier et de surfaces en tout genre                  | <b>mikrozid® AF liquid, wipes, wipes Jumbo, wipes premium</b>                                                                 | Après chaque usage                                                                                                           | Frotter énergiquement les surfaces avec du <b>mikrozid® AF</b> et laisser agir.<br>Veiller à ce que la surface soit entièrement mouillée.<br><b>Temps d'action: 1 minute</b>                                                                                                                                                                                                   | Solution / lingettes alcoolisées prêtes à l'emploi<br>(Ne pas traiter le verre acrylique et le bois naturel avec <b>mikrozid® AF</b> )                                              |
|  | Désinfection rapide pour surfaces sensibles à l'alcool, de produits médicaux, appareils, mobilier et surfaces en tout genre | <b>mikrozid® universal liquid, wipes green line, wipes premium</b><br><b>mikrozid® sensitive liquid, wipes, wipes premium</b> | Après chaque emploi pour les surfaces sensibles à l'alcool<br><br>Après chaque emploi pour les surfaces sensibles à l'alcool | Frotter énergiquement les surfaces avec du <b>mikrozid® universal</b> et laisser agir.<br>Veiller à ce que la surface soit entièrement mouillée.<br><b>Temps d'action: 1 minute</b><br><br>Frotter énergiquement les surfaces avec du <b>mikrozid® sensitive</b> et laisser agir.<br>Veiller à ce que la surface soit entièrement mouillée.<br><b>Temps d'action: 1 minute</b> | Solution / lingettes faiblement alcoolisées et prêtes à l'emploi<br><br>Solution et lingettes prête à l'emploi sans alcool                                                          |
|  | Sols, sanitaires, inventaire, appareils et mobilier                                                                         | <b>terralin® protect</b>                                                                                                      | Quotidiennement ou après contamination et salissure                                                                          | Nettoyage humide des surfaces / port de gants.<br><b>Temps d'action: 1 heure</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>Solution de désinfection à 0,5 %</u><br>5 ml de concentré et 995 ml d'eau<br>= 1000 ml de solution de désinfection                                                               |