

Reinigung und Desinfektion leicht gemacht

Wandspender sm 2 universal / sm 2 500 / KHK/KHL

Schritt 1

Entnehmen Sie die Produktflasche aus dem Wandspender. Die glatten und polierten Oberflächen ermöglichen eine leichte Reinigung sowie die Desinfektion mit perform® bzw. mikrozid® AF Tüchern.



Schritt 2

Setzen Sie eine Flasche mikrozid® AF liquid ein und pumpen Sie die Flüssigkeit 20 mal durch. Fangen Sie das Desinfektionsmittel in einem Becher auf.

 5 Minuten einwirken lassen



Schritt 3

Entnehmen Sie nach der Einwirkzeit nun die Flasche mikrozid® AF liquid und pumpen Sie, bis der Schlauch leer ist. Fangen Sie die Flüssigkeit wieder in dem Becher auf.



Schritt 4

Wischen Sie den Schlauch mit einem trockenem Tuch ab, um Rückstände zu entfernen.



Schritt 5

Setzen Sie eine Flasche des gewünschten Produkts ein und pumpen Sie dieses 20 x mal in den Becher. Der Inhalt des Bechers kann anschließend ins Abwasser entsorgt werden.



Schritt 6

Danach ist der Spender für den nächsten Einsatz bereit.



Folgende Produkte wurden für die qualitätsgesicherte Aufbereitung der sm 2 universal / sm 2 500 / KHK/ KHL Spender getestet.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.