

Fußpflegeschränk

AT / NT Midi Silent



Gebrauchsanweisung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren zum Kauf dieses Fußpflegeschranks.

Dieser **AT/NT Midi Silent** integriert leistungsstarke Spray- und Absaugtechnologie in einer komfortablen Schrank- und Geräteeinheit.

Der AT/NT Midi Silent eignet sich ideal zum Einsatz mit einem sehr leise laufenden Spraygerät SIRIUS NT MICRO mit Licht(s. Katalogseite 132)

Bei der Konstruktion des Fußpflegeschranks AT/NT Midi Silent wurde neben dem anspruchsvollen Design auf ergonomisch günstige Position aller Bedienelemente besonderer Wert gelegt. Des Weiteren kommt eine besonders leistungsstarke, aber dennoch leise Absaugeinrichtung zum Einsatz. Ermöglicht wird dies durch den besonders leisen MIELE Silent & Compact Staubsauger

Die Einheit **AT/NT Midi Silent** wird nach strengen Qualitätskriterien gefertigt und geprüft. Damit ist das Gerät für den Einsatz in der Fußpflege für alle Behandlungen geeignet.

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, möchten wir Sie bitten, beiliegende Gebrauchsanweisung gründlich durchzulesen. Sie erreichen damit die optimale Nutzung und vermeiden kostenpflichtige Reparaturen, die durch Fehlbedienung entstehen können.

Wir wünschen Ihnen mit diesem neu erworbenen Fußpflegeschrank **AT/NT Midi Silent** viel Erfolg und ungetrübte Freude.

Ihre Eduard Gerlach GmbH

Erklärung verwendeter Symbole

Symbole:



Dieses Symbol weist auf besondere Angaben bzw. Ge- und Verbote zur Schadensverhütung hin. Diese Hinweise dienen der Arbeitssicherheit.



Dieses Symbol steht vor besonders wichtigen Hinweisen zur Einhaltung von Vorschriften oder wenn die Gefahr einer Sachbeschädigung besteht.

Für die Bedienung des optionalen Spraygerätes ist die gesonderte Gebrauchsanweisung des Spraygerätes zu beachten. Auf die Handhabung und Funktion des Gerätes wird in dieser Gebrauchsanweisung nicht eingegangen.

Inhaltsverzeichnis:

1.	Gerätebeschreibung	Seite	04
2.	Zweckbestimmung	Seite	05
3.	Anforderungen an den Betreiber	Seite	05
4.	Personal- und Patientenschutz	Seite	05
5.	Sicherheitshinweise	Seite	05
6.	Auspacken des Fußpflegeschranks und erste Inbetriebnahme	Seite	06
6.1	Montage des Handstück- und Leuchtenhalters	Seite	06
6.2	Montage Absaugschlauch	Seite	07
6.3	Steckdosenleiste	Seite	07
6.4	Positionierung des Schalters für die Absaugleuchte	Seite	08
7.	Handhabung der Lupenleuchte	Seite	09
8.	UV-Entkeimungsfach	Seite	09
9.	Wartung, Reinigung und Desinfektion	Seite	09
10.	Staubbeutelwechsel	Seite	10
10.1	Abluftfilterwechsel	Seite	11
10.2	Wechsel des Motorschutzfilters	Seite	12
11.	Wartung UV-Entkeimungsfach	Seite	12
12.	Fehleranalyse	Seite	13
13.	Ersatzteile	Seite	13
14.	Technische Daten	Seite	14
15.	Gewährleistung	Seite	14
16.	Haftung	Seite	14
17.	Umwelt	Seite	14

1. Gerätebeschreibung

Absaugleuchte

Anschlusssteckdose



Fußschalter für Spray-
gerät bzw. Absaugung

UV-Fach

Regelung der Absaugstufe

Leuchtenhalter

Absaugleuchte

Anschluss Absaug-
schlauch

Handstückhalter



2. Zweckbestimmung

Der Fußpflegeschränk AT/NT Midi Silent ist für den stationären Einsatz in der Fußpflege und Podologie bestimmt.

3. Anforderungen an den Betreiber

Der Fußpflegeschränk AT/NT Midi Silent ist nur von ausgebildeten und eingewiesenen Fußpflegern, Podologen etc., die mit der Arbeitsweise vertraut sind und über eine entsprechende Ausbildung verfügen, in Betrieb zu nehmen.

4. Personal- und Patientenschutz



Hinweis:

Sollten Sie dieses Zeichen, auf dem von Ihnen benutzten Geräteteil sehen lesen Sie bitte aufmerksam in der Gebrauchsanweisung unter dem entsprechenden Kapitel nach!

- Betreiben Sie das Gerät nur in einwandfreiem Zustand.
Das Gerät ist nur für den bestimmten Zweck zu verwenden.
- Sorgen Sie vor Beginn der Behandlung für eine stabile, ruhige Lage des Patientenfußes. Arbeiten Sie am Fuß des Patienten nur mit leichtem Druck und äußerster Vorsicht, um Verletzungen vorzubeugen.

Beachten Sie die Wartungs- und Hygienehinweise!

5. Sicherheitshinweise

Der Fußpflegeschränk darf nur auf horizontaler Ebene betrieben werden. Es besteht keine Kippsicherheit auf schrägen Ebenen (5° oder 10°). Bitte beachten Sie, dass beladene bzw. gefüllte Schubladen nicht gleichzeitig voll ausgezogen werden.

Der Fußpflegeschränk ist nur in stationärer Lage zu betreiben.

Die Bremsen der Rollen müssen vor Inbetriebnahme des Gerätes festgestellt werden, um ein unabsichtliches Verschieben des Schrankes zu vermeiden. Die Rollen sollen Ihnen die Möglichkeit geben, beim Staubbeutelwechsel oder Reinigungsarbeiten den Schränk zu verrücken.

Das Lüftungsgitter darf nicht verdeckt werden.

Vergewissern Sie sich, dass Ihre Stromversorgung mit der angegebenen Nennspannung des Fußpflegeschranks (230 V/ 50 Hz) übereinstimmt. Das elektrische Leitungsnetz muss mit einer wirksamen Erdung versehen sein und die Installation muss allen einschlägigen Vorschriften entsprechen.

Achtung:

Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu vermeiden, darf dieses Gerät nur an eine Versorgung mit Schutzleiter angeschlossen werden.

Der Staubsauger darf nur für trockenes Staubgut eingesetzt werden.

Die werkseitig angebrachten Informations- und Sicherheitshinweise müssen deutlich lesbar sein und dürfen nicht entfernt werden. Falls notwendig, müssen sie ersetzt werden.

Beachten Sie bitte die zusätzlichen Sicherheitshinweise in den einzelnen Kapiteln.

6. Auspacken des Fußpflegeschranks und erste Inbetriebnahme

Nach Entfernen der Verpackung des Fußpflegeschranks AT/NT Midi Silent prüfen Sie zunächst alle Teile auf äußere Beschädigungen.

Folgende Komponenten sind im Lieferumfang enthalten:

- + Fußpflegeschrank AT/NT Midi Silent incl. Miele-Staubsauger und Zubehör sowie Gebrauchsanweisung
- + 1 x Fußschalter für Absaugvorrichtung
(bereits vormontiert im Staubsaugerfach hinterlegt)
- + 1 x Handstückhalter mit 2 Befestigungsschrauben
- + 1 x Handstückhaltereinsatz NT mit Befestigungsschraube
- + 2 x Fräserständer
- + 2 x Instrumententablets 1402
- + 1 x Schubladeneinsatz 378 x 281 x 35mm
- + 1 x Universalleuchtenhalter mit 3 Befestigungsschrauben
- + 1 x Schalterunterlage
- + 1 x Gebrauchsanweisung

Sollte eines der Teile fehlen reklamieren Sie dies bitte sofort bei Ihrem Lieferanten.

Sollten Sie Schäden feststellen, bitte sofort den Schaden schriftlich oder telefonisch bei Ihrem Lieferanten unter Angabe der Seriennummer melden. Nur so ist gewährleistet, dass der Verursacher der Beschädigungen festgestellt und eine mögliche Reparatur oder Instandsetzung für Sie kostenfrei durchgeführt werden kann.

Stellen Sie den Fußpflegeschrank sicher an eine geeignete ebene Position.

Dieses Gerät ist nur in stationärer Lage zu betreiben. Um ein unabsichtliches Verschieben des Schrankes zu vermeiden, müssen die Fuß-Rollen festgestellt werden.

Beachten Sie, dass der Schrank ca. 10 cm von der Raumwand abstehen muss, somit wird entstehende Erwärmung der Elektronik und der Absaugeinrichtung einwandfrei abgeführt. Sie vermeiden hiermit wirkungsvoll einen Hitzestau und mögliche Schäden. Die Lüftungsgitter rechts und links der Steckdose dürfen nicht verdeckt werden.

6.1 Montage des Handstück- und Leuchtenhalters


Befestigen Sie den beigegefügt Handstückhalter mit den zwei Befestigungsschrauben an der linken Seitenwand des Schrankes. Montieren Sie den Handstückhaltereinsatz mittels der mitgelieferten Kreuzschlitzschraube in den Handstückhalter mit der breiteren Öffnung nach oben.



Im Anschluss montieren Sie bitte den Leuchtenhalter ebenfalls an der linken Schrankseite mittels der mitgelieferten Schrauben an der vorgesehenen Position (s. Pkt.1). Nun ist es Ihnen möglich die vormontierte Absaugleuchte in den Leuchtenhalter einzustecken. Beachten Sie an dieser Stelle die Hinweise des Beilegers im Leuchtenhalter.

6.2 Montage Absaugschlauch

In der linken Seitenwand befindet sich die Anschlussbuchse für den Absaugschlauch. Drücken Sie hier den Saugstutzen der Absaugvorrichtung bis zum Anschlag ein.

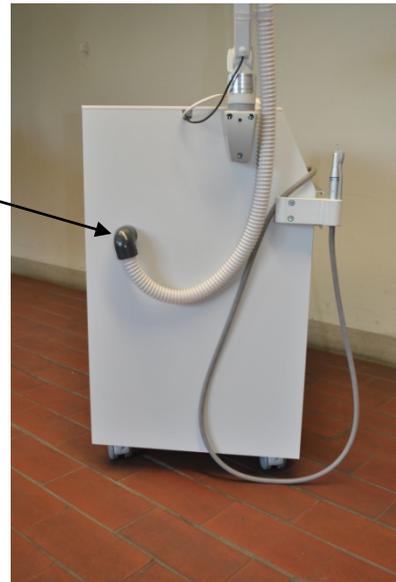

6.3 Steckdosenleiste


Stecken Sie den Netzstecker der Steckdosenleiste in eine Haussteckdose mit der Nennspannung (230V / 50Hz) und schalten sie am grünen Schalter ein. In der rechten Steckdose sollte das Spraygerät eingeschossen werden. Damit ermöglichen Sie den vorderen Auszug für eine problemlose Befüllung des Spraytanks ausziehen zu können.

Ihr AT/NT Midi Silent ist jetzt betriebsbereit.




Beachten Sie den max. Anschlusswert von 3600 Watt der Steckdosenleiste. Mit Einschalten des Hauptschalters liegt in der Zusatzsteckdose des Staubsaugerfaches die Netzspannung an! Diese Dose ist ausschließlich für die Stromversorgung des Staubsaugers, des Fußpflegegerätes, der Lampe und des UV – Faches vorgesehen.

6.4 Positionierung des Schalters für die Absaugleuchte

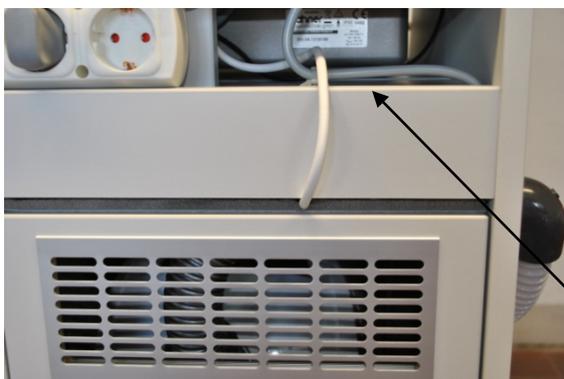

Die leistungsstarke Absaugeinrichtung wird durch einen zusätzlichen, frei positionierbaren Schalter ein- und ausgeschaltet. Dieser Schalter ist bereits im Staubsaugerfach vormontiert platziert.

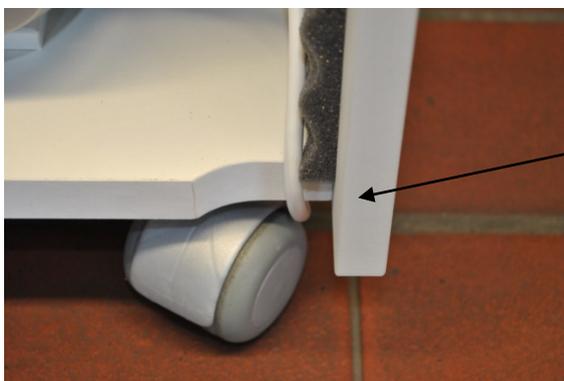

Entsprechend Ihrer Arbeitsweise können Sie den Schalter als Fuß- oder Handschalter benutzen. Dazu entnehmen Sie den Schalter aus dem Staubsaugerfach führen das Kabel über die obere Bürstenleiste oder verdeckten Türdurchführung aus dem Schrank und positionieren den Schalter entsprechend Ihrer Wahl.



Sollten Sie den Schalter als Handschalter benutzen wollen, führen Sie bitte das Schalterkabel von hinten durch den Schrank, so dass sie es seitlich aus der Öffnung wieder herausführen können. Hierbei können Sie auch gleichzeitig das Anschlusskabel der Leuchte durch den Schrank nach hinten führen und seitlich am Gerät ablegen. Somit stören Sie die Kabel nicht während Ihrer Arbeit.




Kleben Sie unter den Schalterboden mittig die im Lieferumfang enthaltene Schalterunterlage. Dafür lösen Sie die beidseitige Schutzfolie vorher ab. Durch diese Schalterunterlage können Sie den Schalter in die gewünschte Position bringen und fixieren. Bei der Reinigung der Arbeitsplatte können Sie den Schalter problemlos lösen und danach wieder neu anbringen.

7. Handhabung der Lupenleuchte

Wir empfehlen Ihnen, die Leuchte zum Einrichten auf Ihre gewünschte Arbeitsposition am vorderen äußeren Lampenring zu fassen.



Sollten Sie im Laufe der Zeit feststellen dass Ihnen die Gelenke der Leuchte zu leichtgängig werden, dann können diese an der markierten Position von außen mittels eines 4 mm Inbusschlüssel (nicht im Lieferumfang enthalten) nachgestellt werden. Dabei ist zu beachten, dass sich der Leuchtenkopf mit einem geringen Widerstand bewegen lassen sollte.

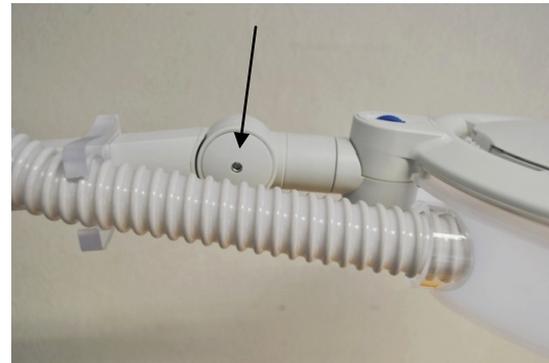

8. UV-Entkeimungsfach

Das UV-Fach ist mit Einschalten des Hauptschalters in Betrieb. Beim Öffnen des UV-Faches erlischt das UV-Licht automatisch.

Das UV-Fach dient zur keimarmen Aufbewahrung bereits desinfizierter oder sterilisierter Fußpflegeinstrumente. Zangen und Scheren sollten im geöffneten Zustand auf die Tablettts gelegt werden. Rotierende Instrumente bitte in die Fräserständer stellen.



UV-Bestrahlung kann Ihre Instrumente nur keimarm halten. Eine Sterilisation Ihrer Instrumente muss anderweitig erfolgen! Zum Beispiel mittels Umluft-, Heißluftverfahren oder eines Autoklaven. Legen Sie nur absolut trockene Instrumente in das UV-Fach.



Beim Öffnen des Auszuges muss das UV-Licht sofort erlöschen. Sollte diese Funktion gestört sein, darf das UV-Fach nicht betrieben werden!

9. Wartung, Reinigung und Desinfektion

Alle Tätigkeiten der Wartung und Desinfektion die in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden sollten, finden Sie im nächsten Abschnitt. Ein Nachweis der durchgeführten Tätigkeiten könnte von den Überwachungsbehörden (z.B. Gesundheitsämtern) gefordert werden.

Unser Tipp: Planen Sie Ihre Wartungs- und Desinfektionsintervalle! Tragen Sie sich diese Termine in Ihren Praxiskalender ein oder führen Sie einen Wartungsnachweisbogen in dem die Termine aufgeführt sind und die Tätigkeiten von Ihnen bestätigt werden können.

Die Schrankoberfläche lässt sich am besten mit einem feuchten Tuch mit bakterienreduzierender Wirkung sauber halten.

Zur Desinfektion verwenden Sie bitte ein alkoholisches Desinfektionsmittel z.B. Bacillol AF. Mit dem damit befeuchten Tuch kann der Schrank abgewischt werden.

Durch die Benutzung von Desinfektionsmitteln kann eine leichte Aufhellung oder Mattierung der Oberflächen erfolgen, die keinerlei Auswirkungen auf die Funktion oder die Sicherheit des Schrankes hat.



Vermeiden Sie in jedem Fall aggressive Lösungsmittel sowie Säuren und Laugen.

Empfehlungen zur Häufigkeit von Desinfektionen:

Tägliche Desinfektion

Bei sichtbar kontaminierten Flächen (Blut, Eiter, Sekreten, Ausscheidungen) sind die Flächen sofort nach der Versorgung des Patienten zu desinfizieren und die jeweilige Einwirkzeit des Desinfektionsmittels ist abzuwarten.

Flächen die kontaminiert sein können, aber keine sichtbare Kontamination aufweisen, können nach der Abtrocknung des Desinfektionsmittels wieder benutzt werden.

Wöchentliche Routinedesinfektion

Wischdesinfektion aller Flächen / Oberflächen, alle Gegenstände, Geräte, Knöpfe, Hebel, Schalter insbesondere die Handkontaktstellen und die patientennahe Flächen.

Dieser Reinigungsvorgang darf nur ausgeführt werden, wenn der Hauptschalter auf "0" steht oder der "Netzstecker" gezogen ist.




Die Sicherheitsregeln beim Umgang mit alkoholischen Desinfektionsmitteln zur Vermeidung von Brand- und Explosionsgefahren sind zu Beachten!

Ausreichendes Lüften und Beseitigen von Zündquellen (nicht Rauchen)!
Heiße Flächen, auch innerhalb von Geräten (Heizlüfter), müssen abgekühlt sein.

10. Staubbeutelwechsel

Wann tausche ich den Staubbeutel aus? Wir empfehlen die wöchentliche Kontrolle der Staubbeutelanzeige.

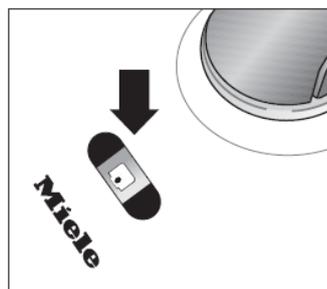


Wenn die Farbskala das Sichtfenster der Staubbeutel-Wechselanzeige rot ausfüllt, müssen Sie den Staubbeutel austauschen.

Staubbeutel sind Einwegartikel. Entsorgen Sie volle Staubbeutel. Verwenden Sie diese nicht mehrfach. Verstopfte Poren reduzieren die Saugleistung des Staubsaugers.

Funktion der Staubbeutel-Wechselanzeige


Wenn Sie jedoch viel Feinstaub, wie z. B. Frässtaub, saugen, verstopfen die Poren des Staubbeutels sehr schnell. Die Staubbeutel-Wechselanzeige wird dann bereits "voll" anzeigen, selbst wenn der Staubbeutel noch nicht voll ist. Er muss dann ausgetauscht werden, da die Saugleistung durch die verstopften Poren reduziert ist.

Bei nachlassender Absaugleistung wechseln Sie bitte den Staubbeutel des im Schrank eingebauten Staubsaugers aus. Sie brauchen den Staubsauger für den Staubbeutelwechsel nicht aus den Schrank herauszunehmen.

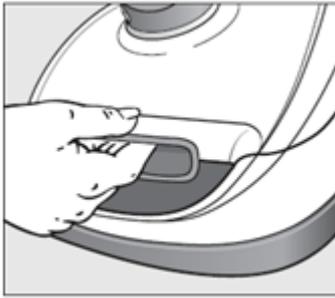


1. Schlauchstutzen vom Staubsaugergehäuse lösen.

Drücken Sie die Entriegelungstaste in der Griffmulde und klappen Sie den Staubraumdeckel bis zum Einrasten auf. Dabei schließt sich der Hygieneverschluss des Staubbeutels automatisch, so dass kein Staub entweichen kann.

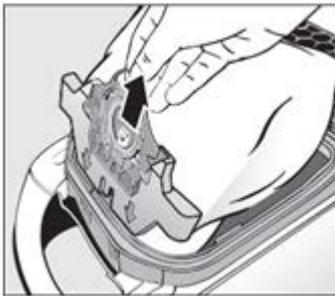

2. Ziehen Sie den Staubbeutel an der Griffflasche aus der Aufnahme.

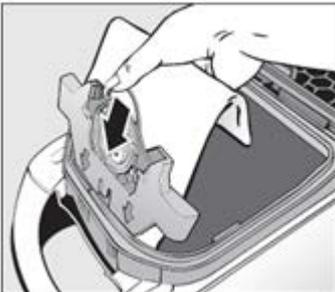


3. Stecken Sie den neuen Staubbeutel bis zum Anschlag in die **rote Aufnahme**. Lassen Sie ihn dabei so zusammengefaltet, wie Sie ihn der Verpackung entnehmen. Entfalten Sie den Staubbeutel im Staubraum so weit wie möglich. Schließen Sie den Staubraumdeckel bis zum Einrasten der Verriegelung und achten Sie darauf, dass der Staubbeutel dabei nicht eingeklemmt wird.

Eine Leerbetriebssperre verhindert das Schließen des Staubraumdeckels, wenn kein Staubbeutel eingesteckt ist. Keine Gewalt anwenden!


10.1 Abluftfilterwechsel

Bei Anbruch einer neuen Verpackungseinheit sollte zusätzlich der Abluft-Filter (HEPA AirClean) und Motorschutzfilter mit gewechselt werden.


Wie tausche ich die Abluftfilter HEPA AirClean aus?

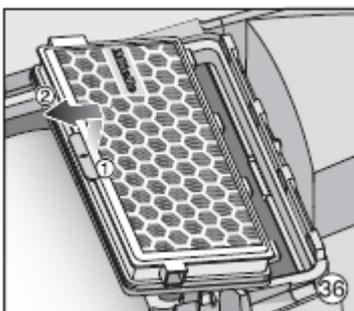

1. Öffnen Sie den Staubraumdeckel. Heben Sie den Abluftfilter an und entnehmen Sie ihn.

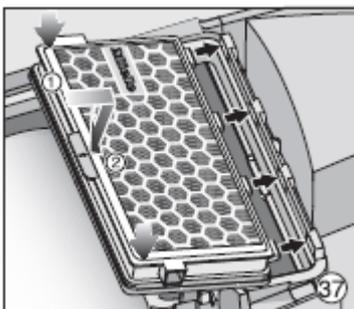

2. Setzen Sie den neuen Abluftfilter passgenau ein und drücken Sie ihn nach unten.

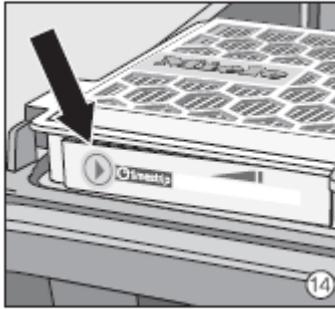

3. Drücken Sie die Abluftfilter-Wechselanzeige




4. Nach ca. 10 - 15 Sekunden erscheint am linken Rand des Anzeigefeldes ein schmaler roter Farbstreifen. Schließen Sie den Staubraumdeckel bis zum deutlichen Einrasten.

10.2 Wechsel des Motorschutzfilters

Wann tausche ich den Motorschutzfilter aus?

Immer dann, wenn Sie eine neue Packung Miele Staubbeutel anbrechen. In jeder neuen Packung Miele Staubbeutel liegt zusätzlich ein Motorschutzfilter.

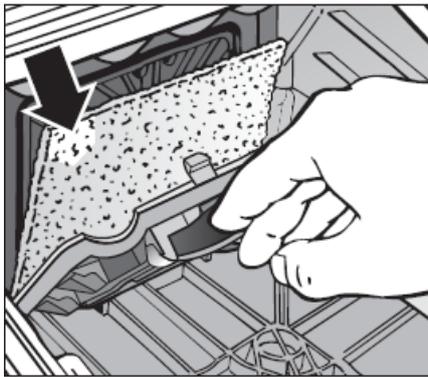

1. Öffnen Sie den Staubraumdeckel. Ziehen Sie den Staubbeutel an der Griffflasche aus der Aufnahme. Klappen Sie den Filterrahmen bis zum deutlichen Einrasten auf und nehmen Sie den verbrauchten Motorschutzfilter an der sauberen Hygieneffläche heraus.

2. Legen Sie den neuen Motorschutzfilter ein. Schließen Sie den Filterrahmen. Stecken Sie den Staubbeutel bis zum Anschlag in die Aufnahme. Schließen Sie den Staubraumdeckel bis zum Einrasten der Verriegelung und achten Sie darauf, dass der Staubbeutel dabei nicht eingeklemmt wird.



Mit dem Staubsauger keine Flüssigkeiten bzw. feuchten Schmutz aufsaugen, das kann zu erheblichen Funktionsstörungen führen; außerdem kann dadurch der Schutz gegen einen elektrischen Schlag beeinträchtigt werden.

11. Wartung UV-Entkeimungsfach

Die UV-Leuchtröhre muss nach ca. 2.500 Betriebsstunden ausgetauscht werden.

UV - Licht ausschalten und Leuchtröhre abkühlen lassen (sonst Verbrennungsgefahr!), UV-Fach aufziehen und Leuchtröhre mit der Hand etwas drehen und herausnehmen, neue Leuchtröhre einsetzen und durch erneutes Drehen verriegeln.

12. Fehleranalyse

Anmerkung: Diese Analyse soll Ihnen helfen, kleine evtl. auftretende Probleme selbst zu beheben. Sollten die empfohlenen Maßnahmen nicht zum Erfolg führen, setzen Sie sich bitte mit der Eduard Gerlach GmbH in Verbindung.

Problem	Ursache	Maßnahme
Fußpflegeschränk ohne Funktion.	Fußpflegeschränk nicht angeschlossen.	Netzstecker in die Steckdose stecken.
	Anschlussteckdose ohne Strom.	Sicherung/Schutzschalter der Stromversorgung prüfen.
	Sicherung defekt.	Sicherung wechseln
Absauganlage funktioniert nicht.	Staubsauger versehentlich beim Staubbeutelwechsel ausgeschaltet	Staubsauger einschalten
	Zwischenstecker lose	festen Sitz des Zwischensteckers kontrollieren. Kontrollleuchte im Zwischenstecker oder Schalter signalisiert ob Funktion in Ordnung ist

13. Ersatzteile

Sollten Sie Ersatzteile bzw. Verbrauchsmaterial benötigen, wenden Sie sich bitte an die Eduard Gerlach GmbH.

Folgende Verbrauchsmaterialien und Zubehör sind zu Ihrem Fußpflegeschränk AT/NT Midi Silent erhältlich:

Bestellnummer	Bezeichnung
Verbrauchsmaterial	
302280400	UV Röhre TUV 16 W
301852010	Miele Staubbeutel F/J/M VE à 4 Beutel
702220205	Schalterunterlage
Zubehör	
701878531	Schubkasteneinsatz 378 x 281 x 35mm
701878530	Tablaraufsatz 313 x 340 x 40 mm
317100102	Instrumententablets 1402
306900300	Fräserständer
701502901	HEPA AirClean 50 Filter

14. Technische Daten

Betriebsspannung:	230 Volt ~ / 50-60 Hz
Schutzklasse:	I / BF
Leistungsaufnahme der Steckdosenleiste	max. 3600 VA
Netzschalter:	2 - polig
Netzanschluss:	Schukostecker
Betriebstemperatur:	10°C - 35°C
Maße AT/NT Midi Silent	705 x 480 x 795 mm (L x B x H)
Länge des Absaugschlauches	160 cm
Gewicht AT/NT Midi Silent	64,4 kg

15. Gewährleistung

Für den GERLACH Fußpflegeschränk gewährt die EDUARD GERLACH GMBH eine Garantie für die Dauer von 12 Monaten ab Rechnungsdatum. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Verschleißteile und/oder Teile, die durch den Gebrauch einer natürlichen Abnutzung unterliegen. Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder fehlerhafte Bedienung entstehen, fallen ebenfalls nicht unter den Garantieanspruch.

Ein sicherer Betrieb mit Fußpflegegerät ist nur mit dem entsprechend geeigneten Zubehör möglich. So müssen Handstücke in einer sicheren Halterung fixiert werden, um z.B. ein Herunterfallen zu verhindern. Beim Betrieb mit Anderen als den o.g. Geräten ist eine Haftung der Eduard Gerlach GmbH ausgeschlossen. Dieses gilt auch für Schäden die durch fehlendes oder nicht geeignetes Zubehör an den Geräten entstehen.

16. Haftung

Die EDUARD GERLACH GMBH lehnt jegliche Haftung für Sach- und Personenschäden ab, die durch Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung entstehen können.

17. Umwelt

Um eine umweltgerechte Entsorgung zu gewährleisten, setzen Sie sich bitte mit der für Ihren Bezirk zuständigen Behörde in Verbindung. Um Missbrauch und Gefahren zu vermeiden, zerschneiden Sie bitte die Netzleitung des Schrankes vor der Entsorgung.
Kontaminierte Geräte und Instrumente sind vor der Entsorgung zu desinfizieren.