

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Wird der Patient während der Behandlung mit der B/S Spange Schmerzen haben? Wird es weh tun?

Nein, keine Sorge! Die Anwendung ist schmerzfrei, da nichts in den empfindlichen seitlichen Nagelfalz geschoben wird.

Nach der Behandlung kann ein leichter ziehender Schmerz auftreten. Die Rückstellkräfte der B/S Spange sind zu stark und müssen von der behandelnden Fachkraft zeitnah korrigiert werden. Der Patient sollte die Spange nicht auf dem Nagel spüren.

Wie lange ist die Zugkraft der B/S Spange gegeben?

Die Korrekturkraft der B/S Spange hält etwa 4 Wochen an. Die B/S Spange sollte alle vier Wochen erneuert werden, bis der Nagel seine gesunde und flache Form erreicht hat.

Was muss der Patient vor einer Spangenbehandlung beachten?

- Keine Fußbäder
- Kein Nassschleifen
- Keine Nagellackentferner
- Keine Anwendung von Ölen und Lotionen
- Keine Desinfektionsmittel

Was darf der Patient nach einer B/S Spangenbehandlung tun?

- Baden / Schwimmen gehen
- Auftragen von Öl oder Fußcreme
- Fußbäder
- Nagellack auftragen
- Entfernen von Nagellack mit Aceton oder ähnlichem
- Salbenverbände
- Die übliche Fußpflege kann wieder durchgeführt werden

Was muss der Patient nach einer B/S Spangenbehandlung beachten?

Wenn der Patient ein unangenehmes Gefühl oder Schmerzen verspürt, sollte dieser sich an den behandelnden Spezialisten wenden.

Warum klebt die B/S Spange nicht?

Die Haftung der B/S Spange kann aus verschiedenen Gründen beeinträchtigt sein:

Verrutschen und wiederholtes Korrigieren beim Anpressen: Durch wiederholtes Verrutschen und Nachkorrigieren beim Anpressen wird die Haftung des Klebers geschwächt. Eine exakte Positionierung ist daher entscheidend. Stützen Sie sich auf dem Fuß des Patienten ab.

Abgelaufener B/S Kleber: Wenn der B/S Kleber abgelaufen ist (nach 9 Monaten), empfehlen wir den Kauf eines neuen Klebers, da abgelaufener Kleber seine Wirksamkeit verliert. Die Chargennummer des Klebers befindet sich auf der Kappe und ist das Verfallsdatum. Beispiel: Chargennummer 1025, Verfallsdatum: Oktober 2025. **Tipp!** Frieren Sie den Kleber ein! Die Haltbarkeit des Klebstoffs wird durch die Aufbewahrung im Gefrierschrank verlängert. Verarbeiten Sie den Kleber immer bei Zimmertemperatur (21-24 Grad).

Zu wenig B/S Kleber verwendet: Eine zu geringe Menge B/S Kleber kann dazu führen, dass die Spange nicht ausreichend haftet. Achten Sie darauf, dass Sie genügend Kleber verwenden.

Unzureichendes Schleifen der Enden der Spange: Wenn die Zugkraft der Spange nach dem Anbringen zu stark ist, schleifen Sie einfach beide Enden der Spange vorsichtig dünner. Wenn nötig, schleifen Sie die gesamte Spange dünner. Eine genaue Korrektur an den Enden der Spange verhindert, dass diese sich vom Nagel abhebt. **Ihr Vorteil:** Die Korrektur der Spangenden erfolgt direkt auf dem Nagel.

Verwendung von zu viel B/S Reiniger: Die Verwendung von zu viel B/S Reiniger bei der Reinigung des Nagels kann die Haftung beeinträchtigen. Ein Tropfen auf den Tupfer reicht aus, um die Nagelplatte zu reinigen.

Kranke Nägel: B/S Spangen sollten nicht auf kranken Nägeln angewendet werden, z. B. bei Pilzerkrankungen, Psoriasis, Onycholyse usw.

Austrocknen des Flascheninhalts/Stringing: Der B/S Kleber kann seine Wirksamkeit verlieren, wenn er mit dem B/S Aktivator (Schnelltrockner) in Berührung kommt und fadenförmig wird.

Kann ich eine B/S Spange auch ohne vorherige Schulung anwenden?

Ja, Sie können die B/S Spange ohne vorherige Schulung anwenden, da sie nicht in den Nagelkörper eindringt und nur auf der Nagelplatte angebracht wird. Wir bieten jedoch Schulungsvideos für die verschiedenen Systeme, wie Classic, Magnet, Magnet+ und Quick sowie kostenlose Anleitungen auf unserer Website an.

Wie viel kann ich für eine B/S Spangenanwendung berechnen?

Sie können für eine Anwendung den gleichen Betrag berechnen wie für eine herkömmliche Fußpflege.

Kann man die B/S Spange auch für super kleine Nägel verwenden, die kürzer sind als die Spange?

Sie können die kleinste Spangengröße verwenden und sie kürzen. Die kleinste Größe wäre die Größe 14. Es spielt keine Rolle, ob Sie sie links, rechts oder auf beiden Seiten kürzen, Sie können die Spange auch in der Breite kürzen. Wenn die Spange gekürzt ist, schleifen Sie diese bitte auf der rauen Seite dünner. Die raue Seite ist die Seite, die auf den Nagel geklebt wird.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie die Spange kürzen, wird sie härter. Sie müssen die Spange elastischer machen, indem Sie das Material der B/S Spange mit einem Fräser abschleifen.

Kann die B/S Spange auch bei Kindernägeln angewendet werden?

Die B/S Spange sollte nicht bei Kindern unter 6 Jahren angewendet werden.

Sie müssen Ihren Patienten fragen, ob er ein unangenehmes Ziehen oder einen Spannungsschmerz verspürt. Ein Kind unter 6 Jahren kann Ihnen keine korrekte Aussage über den Spannungsschmerz geben.

Kann die B/S Spange an den Fingernägeln angebracht werden?

Sie können die B/S Spange auf den Fingernägeln anbringen.

Bitte beachten Sie, dass Sie die Spange viel dünner schleifen müssen als bei den Zehennägeln.