

MELAG



MADE IN GERMANY



Podo

SteriHero

Mein Autoklav. Meine **Superpower**.

Ihre neue **Superpower**

Egal welche großen Aufgaben der Tag für Sie bereithält. **SteriHero Podo** hält Ihnen den Rücken frei. Denn der brandneue Stand-alone Autoklav der Klasse B und S erfüllt jetzt auch die Anforderungen als Medizinprodukt und ist perfekt auf die Podologie abgestimmt: Von den Funktionen bis zum Preis! Leistungsstarke Technologien, ein intuitives Smart-Touch-Display und die einzigartige MELAG Qualität - made in Germany geben Ihnen die Superpower, alles zu verändern:

Jetzt auch als
**Klasse B & S
Autoklav**



SteriHero Podo 18



Supersicher

Sicherheit für Ihre Patienten: Autoklaven der Klasse B und S bieten mit dem fraktionierten Vakuumverfahren die sicherste Sterilisation Ihrer verpackten und unverpackten Instrumente - ideal abgestimmt auf die Art und Komplexität.

Dampfsterilisation der Klasse B und S gemäß EN 13060

Superstark

Mehr als genug Power für alles, was Sie vorhaben: Hohe Beladepazitäten, kurze Zykluszeiten ab 13 min und eine effektive Vakuum-Schnelltrocknung garantieren einen kurzfristigen Wiedereinsatz Ihrer Instrumente.

Bis zu 5 kg auf 5 Tablett



Supersmart

Das intuitive Bedienkonzept mit großem Smart-Touch Display macht alles einfach einfacher: Von der Programmwahl bis zur Dokumentation. Mit Hilfe der Prozessüberwachung erbringen Sie so den lückenlosen Nachweis einer erfolgreichen Sterilisation.

Dokumentation per USB, Netzwerk oder Protokollausdruck*

Superrobust

Ein Autoklav darf niemals ausfallen: Deshalb gehen wir bei der Qualität keine Kompromisse ein und entwickeln, produzieren und optimieren unter höchsten Qualitätsansprüchen seit 1951 an unserem Firmensitz in Berlin.

100 % Qualität - made in Germany



Ein Dreamteam für Ihre Praxishygiene:



„Unsere Patienten stehen für uns an erster Stelle: Mit der individuell auf meine Praxisbedürfnisse zugeschnittenen Systemlösung bieten wir maximalen Schutz bei minimalem Aufwand.“

Praxis für Podologie, Vera Wille



„Der Verantwortung, nur einwandfreie Instrumente am Patienten einzusetzen, werden wir mit unserem neuen Aufbereitungsverfahren mit Geräten von MELAG gerecht.“

Praxis für Podologie, Reni Otte

Schützt die Umwelt. Und Ihre Patienten.

SteriHero Podo garantiert mit vielfältigen Programmen eine sichere Sterilisation ganz nach Ihren Bedürfnissen. Doch damit nicht genug: Das wegweisende Stand-alone Gerätekonzept und die Energiesparfunktion Power Save machen SteriHero Podo zur saubersten Lösung - für Ihr Budget und die Umwelt.

Programme SteriHero Podo 18	Universal-B	Schnell-S	Schnell-B	Schon-B	Prionen-B
Programm-Spezifikation	134 °C, Haltezeit: 5,5 min	134 °C, Haltezeit: 3,5 min	134 °C, Haltezeit: 5,5 min	121 °C, Haltezeit: 20,5 min	134 °C, Haltezeit: 20,5 min
Betriebszeiten (bei Minimal- bis Maximalbelastung)*	22 – 27 min	15 – 18 min	22 – 25 min	37 – 42 min	37 – 42 min
Trocknungszeiten (zeitgesteuert)	20 min	5 min	10 min	20 min	20 min

Programme SteriHero Podo 18 S	Universal-S	Schnell-S	Schon-S	Prionen-S
Programm-Spezifikation	134 °C, Haltezeit: 5,5 min	134 °C, Haltezeit: 3,5 min	121 °C, Haltezeit: 20,5 min	134 °C, Haltezeit: 20,5 min
Betriebszeiten (bei Minimal- bis Maximalbelastung)*	18 – 23 min	13 – 19 min	33 – 37 min	33 – 38 min
Trocknungszeiten (zeitgesteuert)	25 min	5 min	25 min	25 min

* Angaben beim Schnell-S Programm für unverpackte Beladung und bei allen anderen Programme für einfach verpackte Beladung. Zeiten können je nach Beladungsart und -menge abweichen.

Gerät / Art.-Nr.	Gerätetyp	Kesselgröße	Kesselvolumen	Beladungsmenge	Geräteabmessungen (B x H x T)	Gewicht	Stromversorgung	Dokumentationschnittstellen
SteriHero Podo 18 ME10118PB	Stand-alone Klasse B Autoklav (mit zusätzlicher Wasser-Aufbereitung kompatibel)	ø 25 cm x 35 cm lang	17 Liter	5 kg Instrumente / 1,8 kg Textilien	47 x 50 x 64 cm (Gerät passt auf 60 cm Tischplatte)	48 kg	220 – 230 V / 50 – 60 Hz (2.100 Watt)	USB, Netzwerk
SteriHero Podo 18 S ME10118PS	Stand-alone Klasse S Autoklav (mit zusätzlicher Wasser-Aufbereitung kompatibel)	ø 25 cm x 35 cm lang	17 Liter	4 kg Instrumente / 1 kg Textilien	47 x 50 x 64 cm (Gerät passt auf 60 cm Tischplatte)	46 kg	220 – 230 V / 50 – 60 Hz (2.100 Watt)	USB, Netzwerk

Rev.0-24/0011-01.24-DE-ME



Papier sparen, Umwelt schützen:

Um Papier zu reduzieren, stellen wir Ihnen die Benutzerdokumentation elektronisch in unserem Downloadcenter bereit. Weitere Informationen finden Sie unter www.sterihero.com

MELAG