



PERFEKTER HALT AUF ALLEN NÄGELN So klebt die Spange!

Wenn Sie diese Tipps und Hinweise beim Aufkleben der Spange beachten, hält jede Klebespange perfekt.

Reinigung

Reinigen Sie sowohl den Nagel als auch die Spange (ggf. nach dem Anpassen an den Nagel) mit dem Alkoholtupfer. Besonders ölige Nägel können Sie mit Aceton (in der Apotheke erhältlich) noch besser entfetten. Warten Sie vor dem Ankleben, bis die gereinigten Flächen komplett getrocknet sind.

Aufgeweichter Nagel

Beachten Sie bitte, dass der Nagel vor der Anwendung nicht aufgeweicht werden darf. Lange Fußbäder und das Auftragen von Desinfektionsmittel oder Hornhautweicher auf den Nagel sind vor der Anwendung zu vermeiden. Ein kurzes Fußbad, das den Nagel nicht aufweicht, beeinträchtigt die Haltbarkeit nicht.



Sparsam verwenden!



**2 Minuten
Trocknungszeit beachten!**



**Korrekter Umgang mit
dem Kleberfläschchen**

Halten Sie den Rand und das Gewinde des Fläschchens sauber. Bei Bedarf z.B. mit einem Tupfer reinigen. Drehen Sie den Deckel des Fläschchens nach dem festen Verschließen wieder minimal auf. Das Verhindert das Verkleben des Fläschchens.



**Fetthaltige Lotionen
und Cremes vermeiden**

Bitte informieren Sie Ihre Patienten, dass fetthaltige Öle oder Cremes die Klebekraft beeinträchtigen können und daher der Bereich des gesamten Nagels bei der Anwendung ausgespart werden soll.



**Hygiene ist Wichtig!
Handschuhe**

Tragen Sie immer Handschuhe bei einer Behandlung.

HÄLT PERFEKT	BITTE VERMEIDEN
Eine dünne Schicht Klebstoff ist die perfekte Verbindungsgrundlage zwischen Spange und Nagel und hält optimal.	Dick aufgetragen kann der Kleber nicht trocknen und die Spange nicht mit dem Nagel verbinden. Verwenden Sie den Kleber daher sparsam.
Trockenzeit 2 Minuten. Messen Sie die Zeit mit einer Sand- oder Stoppuhr und nutzen Sie die 2 Minuten für Beratungs- oder Verkaufsgespräche. Dann ist perfekter Halt garantiert.	Nach einer Minute „mal testen“, ob die Spange schon fest ist, stört den Klebevorgang. Vertrauen Sie dem OrthoGlue® – er macht seine Arbeit perfekt, braucht dafür aber 2 Minuten.
Die Ränder der Spange müssen fest aufgeklebt sein. Achten Sie beim Kleben darauf, dass alle Kanten und Ecken am Nagel anliegen.	Stehen die Ecken der Spange vom Nagel ab, wird sich die Spange durch Reibung am Schuh frühzeitig lösen. Daher muss die gesamte Klebefläche bis zu den Rändern und Ecken fest auf der Nagelplatte aufliegen während der Klebphase.
Der geöffnete Kleber ist 3 Monate lang haltbar – das hört sich kurz an, aber es sind nur 4 Kleber, die man pro Jahr für die 100% sichere Klebung benötigt.	Ein abgelaufener Kleber (siehe Haltbarkeitsdatum) oder zu lange geöffneter Kleber verliert seine Klebekraft und damit die Haltbarkeit auf dem Nagel. Verwenden Sie den alten Kleber lieber als Sekundenkleber für kleine Reparaturen im Haushalt, als für die medizinische Behandlung.
Ungeöffnet können Sie den Kleber im Kühlschrank lagern. Sobald er offen ist, bewahren Sie ihn einfach bei Zimmertemperatur auf. So ist er immer zur Hand und hat die optimale Verarbeitungstemperatur.	Rein, raus, warm, kalt – das bekommt dem Kleber nicht gut. Daher nach dem Öffnen stellen mehr in den Kühlschrank stellen, sondern bei Zimmertemperatur aufbewahren.