

GEBRAUCHSANWEISUNG

Fußpflegestuhl S3.2
extra breit
75020




WICHTIG

Bitte lesen sie diese Gebrauchsanweisung vor der Benutzung des Stuhles. Die Befestigung des Stuhles am Boden und die Maßnahmen zur Kippsicherheit sind besonders wichtig. Bewahren sie diese Anleitung sorgfältig auf.

INHALTSVERZEICHNIS

1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN	3
1.1 Vorwort.....	3
1.2 Besondere Merkmale des Fußpflegestuhles S4.2	3
1.3 Zusammenbau und Anschluss.....	3
2 DIE BEDIENUNG	6
2.1 Verstellmöglichkeiten.....	6
2.1.1 Home-Schalter.....	6
2.1.2 Armauflagen:	7
2.1.3 Höheneinstellung.....	7
2.1.4 Sitzneigungsverstellung (Trendelenburg)	7
2.1.5 Rückenverstellung	8
2.1.6 Verstellung der Beinauflagen.....	8
2.1.7 Drehung des Sitzes	8
3 ALLGEMEINE HINWEISE	9
3.1 Die Reinigung der Polsters / Desinfektionshinweise.....	9
3.2 Wartung.....	11
3.3 Allgemeine Vorsorgemaßnahmen.....	11
3.4 Technische Daten	11
3.5 EU-Konformitätserklärung.....	12

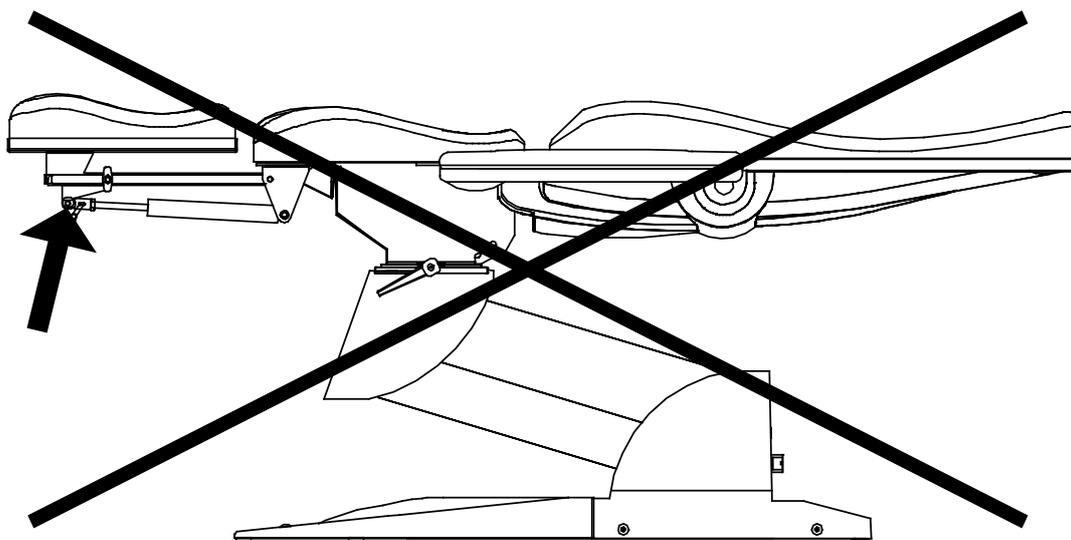

ACHTUNG!

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten Sie darauf hinweisen, dass der Fußpflegestuhl nicht an den Beinstützen getragen werden darf. Dadurch eventuell auftretende Beschädigungen oder Funktionsstörungen führen zu kostenpflichtigen Reparaturen.

1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

1.1 Vorwort

Vielen Dank für den Kauf unseres Produktes. Wir versichern Ihnen, dass Sie eine ausgezeichnete Wahl getroffen haben. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung, bevor Sie den Stuhl in Gebrauch nehmen und bewahren Sie diese sorgfältig auf. Halten Sie die Anweisungen in dieser Anleitung ein, denn sie sind für die richtige und verantwortungsbewusste Benutzung notwendig und werden dazu beitragen, dass Sie mit Ihrem Kauf zufrieden sind.

Beachten Sie besonders die folgenden Punkte:

TIPP : eine andere Möglichkeit
ANMERKUNG : mögliche Probleme
ACHTUNG : möglicher Schaden
WARNUNG : mögliche Verletzung

1.2 Besondere Merkmale des Fußpflegestuhles S4.2

- ✓ Besonders anschmiegsamer Kunstlederbezug und körperbetonte Polster
- ✓ Behandlungshöhe der Füße über Fußschalter bis auf 1,30 m einstellbar
- ✓ Elektromotorisch einstellbare Sitzneigung und Rückenverstellung
- ✓ Home-Schalter für Einstiegsposition
- ✓ Stuhl lässt sich völlig in die Waagerechte verstellen
- ✓ Leichtgängiger kugelgelagerter Sitzträger 180° drehbar – und feststellbar.
- ✓ Beinauflagen klappbar (gasfederunterstützt), ausziehbar und nach außen schwenkbar
- ✓ Leichte Pflege



Abbildung A: körperbetonte Polster

1.3 Zusammenbau und Anschluss

Nach Entfernung der Transportbänder ist das Oberteil des Kartons leicht abzunehmen. Nehmen Sie zuerst die 2 losen Beinauflagen heraus und tragen Sie den Stuhl anschließend mit zwei Personen an die gewünschte Stelle. Überprüfen Sie, ob beim Transport keine Schäden aufgetreten sind. Im Schadensfall wenden Sie bitte sofort an Ihren Spediteur und an die Eduard Gerlach GmbH.

Nach Prüfung des Lieferumfangs sind die Beinauflagen am Stuhl zu befestigen. Dazu wird ein Innensechskantschlüssel mitgeliefert. Beachten Sie die richtige Position (Abbildung B bis D).



Abbildung B: Schrauben etwas losdrehen....

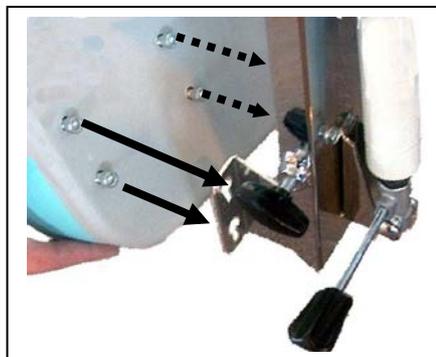


Abbildung C:Beinauflage in die Löcher hängen....



Abbildung D:und wieder festdrehen

Der Stuhl soll zur Sicherung der Stabilität am Boden befestigt werden. Bei Unterlassung könnte eine gefährliche Situation entstehen, wenn der Stuhl mit dem Kunden in den höchsten Stand gehoben wird. Am Stuhl befindet sich ein Plastikbeutel mit den erforderlichen Befestigungsmitteln. (Abbildung E).

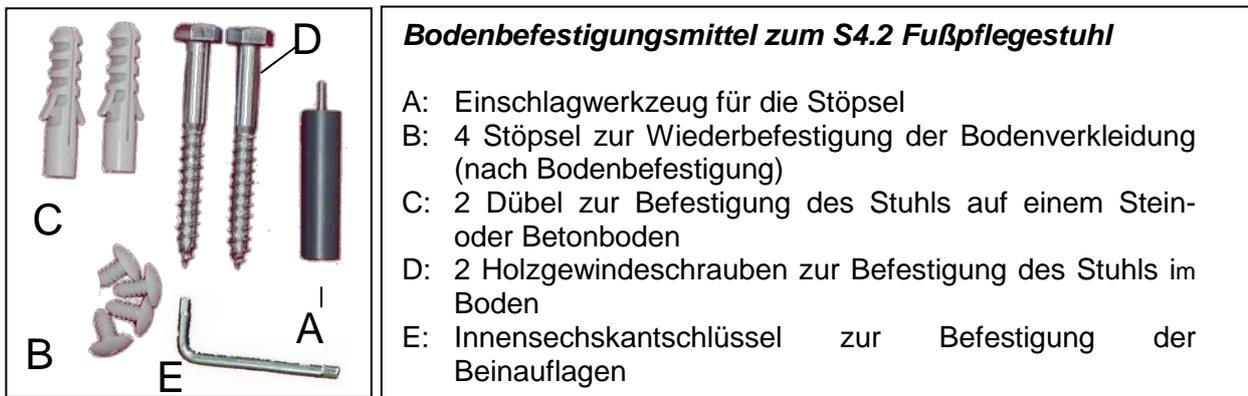


Abbildung E: die Befestigungsmittel

Bevor Sie anfangen mit der Verschraubung, prüfen Sie, ob der Stuhl standfest ist und waagrecht steht. Wenn der Boden am Arbeitsplatz nicht völlig eben sein sollte und der Stuhl wackelt, kann dieses durch Drehung der Stellfüße korrigiert werden. Die Stellfüße befinden sich an den 2 hinteren Ecken des Bodengestells. Bringen Sie den Stuhl in die höchste Position, damit er leichter auf die Seite zu legen ist. Die Stellfüße sind jetzt ohne Probleme zu drehen. Durch Rechtsdrehung werden die Stellfüße kürzer und bei Linksdrehung länger. (Abbildung F)

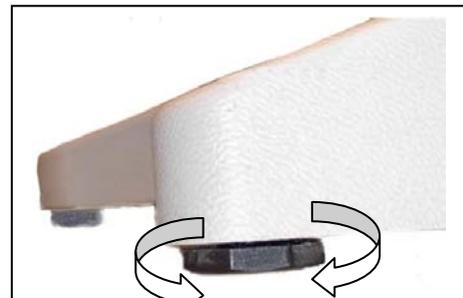


Abbildung F: die Stellfüße

Jetzt kann der Stuhl im Boden befestigt werden. Verstellen Sie den Stuhl zuerst der elektrischen Fußbedienung bis etwa 80 cm Sitzhöhe. (Die Höhenverstellung entnehmen Sie Paragraph 2.1.1.). Ziehen Sie den Stecker und schneiden Sie die 4 Kunststoffstöpsel der hinteren Sockelverkleidung mit einem kleinen Messer vorsichtig ab. (Abbildung G)

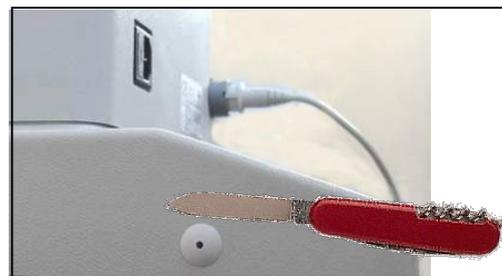


Abbildung G: Entfernung der Kunststoffstöpsel der hinteren Sockelverkleidung

Die hintere Sockelverkleidung ist jetzt leicht abzunehmen. Die Reste der Kunststoffstöpsel, die sich möglicherweise noch in den Löchern des Bodengestelles befinden, können Sie sehr leicht mit Hilfe des Innensechskantschlüssels nach innen durchdrücken. Zur Befestigung des Stuhles auf einem Holzboden benutzen Sie nur die 2 Holzgewindeschrauben. Zur Befestigung auf einem Stein- oder Betonboden, werden zuerst die 2 Dübel fachgerecht eingebracht, und danach die Schrauben eingedreht. Zum Bohren in Stein- oder Betonboden benötigen Sie einen Steinbohrer von \varnothing 12 mm. (Abbildung H)

Nachdem der Stuhl fest am Boden verschraubt worden ist, kann die Abdeckkappe des Bodengestells wieder angebracht werden. Hierzu benutzen Sie die 4 Stöpsel und das Montagewerkzeug. Stecken Sie das mitgelieferte Montagewerkzeug in einen der Stöpsel und dann zusammen in eines der Löcher. Mit einem leichten Hammerschlag wird jetzt der Stöpsel in das vorgesehene Loch geschlagen (Abbildung I). Dies machen Sie an allen 4 Ecken.

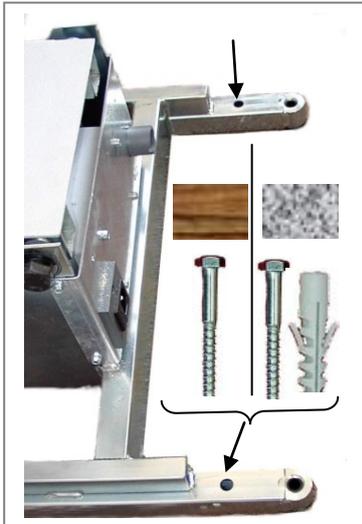


Abbildung H: Befestigung des Stuhls am Boden.



Abbildung I: Mit dem Einschlagwerkzeug befestigen Sie die 4 Stöpsel

WARNUNG:

Der Stuhl kann nur völlig sicher in allen Positionen und mit der höchsten Belastung benutzt werden, wenn er auf dem Boden befestigt ist.

TIPP

Wenn der Stuhl nicht am Boden verschraubt werden soll, gibt es noch die Möglichkeit zum Erwerb eines Satzes von 2 Erweiterungsfüßen von \varnothing 145 mm. Schrauben Sie die Kunststofffüße aus dem Bodengestell und ersetzen Sie diese durch die Erweiterungsfüße. (Abbildung J). Falls der Boden nicht völlig waagrecht sein sollte, ist das durch weiter oder weniger weit hineindrehen der Füße zu korrigieren.

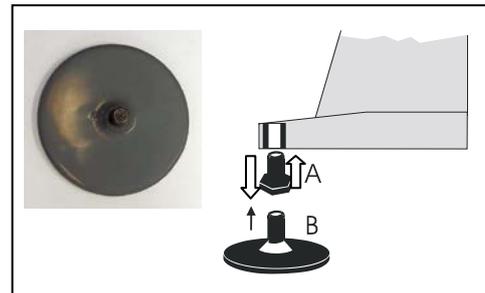


Abbildung J: falls der Stuhl nicht am Boden verschraubt werden kann, sind Erweiterungsfüße zu empfehlen

WARNUNG:

Bei Verwendung der Erweiterungsfüße und Drehung des Stuhles um 90°, sollten Sie die Arbeitshöhe so einschränken, dass die Kippsicherheit gewährleistet ist.

An der hinteren Sockelverkleidung befindet sich die Anschlussbuchse für die elektrische Fußbedienung. Der Stecker sitzt richtig, wenn die Nase genau in die Aussparung an der linken Seite der Buchse greift (Abbildung K). Der Stecker ist werkseitig bereits eingesteckt. Sollten Sie den Stecker dennoch einmal lösen, dann achten Sie bitten auf korrekten Sitz.

Links neben der Buchse für das elektrische Fußpedal befindet sich der Netzanschluss. Stecken Sie zuerst den Stecker fest in die Buchse und darauf den Netzstecker in eine Schuko-Wandsteckdose.

ACHTUNG: Bevor Sie das Netzkabel zum ersten Mal an eine Wandsteckdose anschließen, prüfen Sie bitte, ob die Spannung auf dem CE-Typenschild (hintere Sockelverkleidung) mit der in Ihrem Land oder in Ihrer Region üblicher Spannung übereinstimmt.



Abbildung K: Die Nase soll in die Aussparung greifen

2 DIE BEDIENUNG

2.1 Verstellmöglichkeiten

Die 3 Basisfunktionen Höhe, Sitzneigung und Rückenverstellung sind über einen Elektromotor stufenlos einzustellen. Die Liege kann völlig waagrecht eingestellt werden. Die Beinauflagen sind unabhängig gasfederunterstützt klappbar. Außerdem sind sie verlängerbar und nach außen schwenkbar. Der Sitzträger ist in beide Richtungen um 90° drehbar. Die Einstiegsposition ist per Knopfdruck abrufbar. Ihr Kunde braucht bei keiner Verstellung abzusteigen. Abbildung L zeigt die einstellbaren Teile und Abbildung M erklärt die Tasten der elektrischen Fußbedienung.

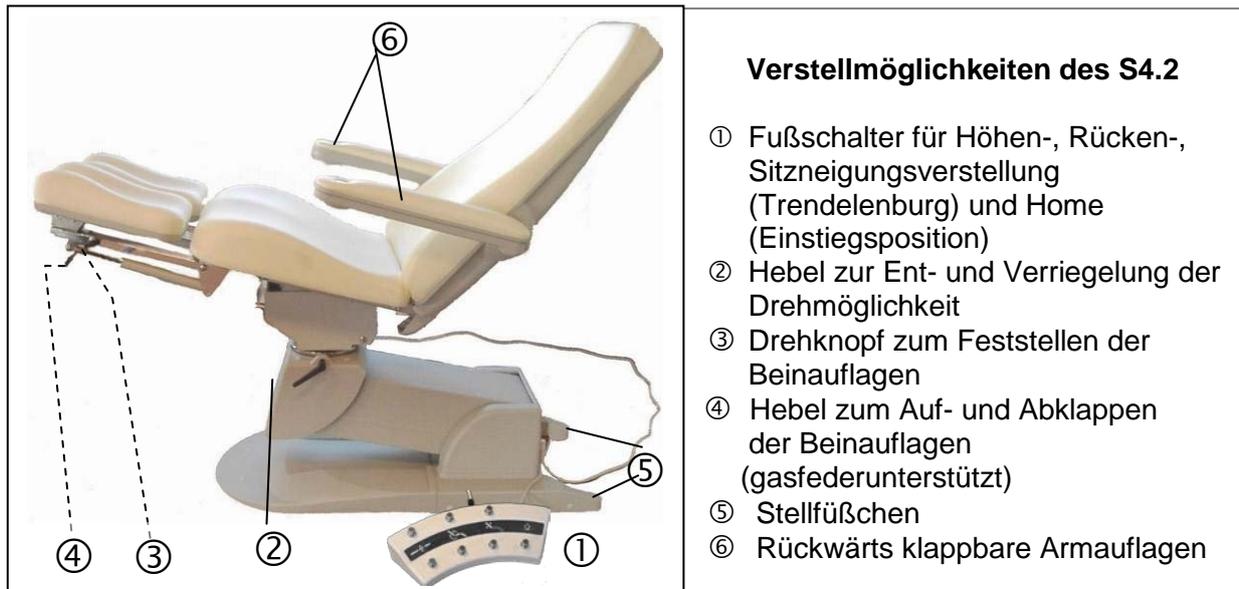


Abbildung L: Verstellmöglichkeiten des S4.2 Fußpflegestuhles



Abbildung M: Fußbedienung des Fußpflegestuhles S4.2.

2.1.1 Home-Schalter

Der Home-Schalter auf der Fußbedienung ermöglicht es Ihnen mit nur einer Tastenfunktion den Stuhl in die Einstiegsposition zu fahren. Dabei ist der Stuhl ganz gesenkt, die Rückenlehne steht gerade und der Sitz ist waagrecht. Dies erleichtert den Ein- und Ausstieg Ihres Kunden. Wenn diese Taste gedrückt und gehalten wird fährt zunächst für ca. 50 Sekunden nur der Höhenmotor herab, es folgt der Trendelenbourgmotor und nach weiteren 5 Sekunden folgt der Rückenlehnenmotor. Drückt man innerhalb des Bewegungsablaufes innerhalb von 3 Sekunden den Home-Schalter nochmal läuft gleichzeitig die nächste Funktion mit ab. Um unabsichtliches Auslösen dieser Funktion zu vermeiden, ist es notwendig, diesen Schalter während der Rückstellung gedrückt zu halten. Abbildung N zeigt die Einstiegsposition wobei eine Armauflage zum Erleichtern des Aufstiegs rückwärts geklappt ist.



Abbildung N: Einstiegsposition

Armauflagen:

Die vorwärts zeigenden Armauflagen bleiben immer parallel zum Sitzteil. In Liegeposition senken die vorwärts zeigenden Armauflagen automatisch ab. Sie können dann die volle Breite der Liege benutzen. In waagerechter Position ist es auch möglich die Armauflagen völlig nach hinten $\pm 200^\circ$ abzuklappen. 1) Ein Kunde in Bauchlage kann seine Arme darauf in einer natürlichen Lage ruhen lassen. Am Ende jeder Armauflage kann man die als Sonderzubehör erhältliche Manicüreschale befestigen- (Abbildung O und P). Wenn die Rückenlehne aufrecht steht, sind die Armauflagen klappbar, um den seitlichen Einstieg zu erleichtern.



Abbildung O: am vorderen Ende der Armlehne kann eine Manicüreschale angebracht werden



Abbildung P: Armauflage mit Manicüre

2.1.2 Höheneinstellung

Mit dem linken Schalterpaar der Fußbedienung ist die Höhe stufenlos einzustellen. (Abbildung M-A1 und M-A2). Über den oberen Schalter fährt der Stuhl hoch und durch Drücken des unteren Schalters geht er abwärts. Halten Sie den Schalter ganz gedrückt bis die gewünschte Position erreicht ist. Die Bedienung geht am einfachsten, wenn Sie Ihren Absatz fest auf den Boden drücken. Der S4.2 Stuhl kann bis über 1 Meter Sitzhöhe gehoben werden (Abbildung Q). Bei Rückwärtsneigung und verlängerten Beinauflagen ist die Arbeitshöhe sogar 1.26 Meter, so dass Sie Ihre Arbeit sogar stehend verrichten können. Durch die Bewegung der Säule verlagert sich der Stuhl sowohl in senkrechte als in waagerechte Richtung. Achten Sie beim Senken darauf, dass verlängerte, nach unten zeigende Beinauflagen, nicht den Boden berühren.



Abbildung Q: der S4.2 Stuhl kann bis über 1 Meter Sitzhöhe gehoben werden

2.1.3 Sitzneigungsverstellung (Trendelenburg)

Über die beiden mittleren 2 Schalter der Fußbedienung ist der Sitz kippbar. Die Bewegung der Rückenlehne und der Beinauflagen ist damit gekoppelt. (Abbildung R). Das heißt: wenn der Sitz rückwärts kippt, neigt sich auch der Rücken rückwärts, und die Beinauflagen kommen hoch. Bei der Vorwärtsneigung (unterer Schalter) bewegen sich der Sitz und der Rücken nach vorne und die Beinauflagen sinken.



Abbildung R: der S4.2 in Rückwärtsneigung und leicht gedreht

2.1.4 Rückenverstellung

Die Rückenlehne ist über das rechte Schalterpaar des Fußschalters elektromotorisch verstellbar. Sie ist sogar völlig in die Waagerechte zu verstellen (Abbildung S). Drücken Sie den Schalter und halten Sie diesen gedrückt. Sobald die Rückenlehne die gewünschte Position erreicht hat, lassen Sie den Schalter wieder los. Die Position des Sitzes und der Beinauflagen verändert sich nicht während der Rückenlehneneinstellung. Der untere Schalter ist zur Rückwärtsverstellung, der obere zur Vorwärtsverstellung.



Abbildung S: der S4.2 in der Waagerechten

2.1.5 Verstellung der Beinauflagen

Die Beinauflagen sind dreifach verstellbar.

Länge: Die Beinauflagen sind auf einfache Weise mehr als 20 Zentimeter ausziehbar. Lösen Sie den Knopf (Abbildung T Position A) an der Außenseite der Beinauflage und ziehen oder schieben Sie die Beinauflage in die gewünschte Position. Drehen Sie den Knopf wieder leicht an, um die Beinauflage festzustellen. Es ist nicht notwendig diesen Knopf ganz fest anzuziehen.

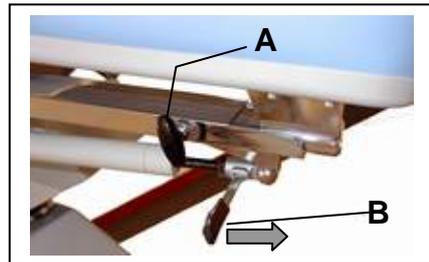


Abbildung T: Knopf und Hebel zur Verstellung der Beinauflagen

Höhe: Wenn Sie die Höhe einer der Beinauflagen verstellen wollen ziehen Sie die Beinauflage einfach hoch. Zum Herunterlassen betätigen Sie den Auslösehebel (Abbildung T Position B) in Richtung des Pfeils. Drücken Sie die Beinauflage nieder. Lassen Sie den Hebel los, sobald die gewünschte Position der Beinauflage erreicht ist.

Seitlich: Um die Beinauflage bis zu 60° seitlich zu verstellen, schieben Sie die Beinauflage einfach nach außen oder zurück (Abbildung Q). Die nach außen gedrehten Beinauflagen erleichtern die Erreichbarkeit der Innenseite des Fußes.



Abbildung Q: durch Schieben oder Drücken drehen Sie die Beinauflagen nach außen.

2.1.6 Drehung des Sitzes

Der Sitz kann nach beiden Seiten um 90° gedreht werden (Abbildung V). Diese Bewegung ist eingeschränkt um zu verhindern, dass die sich in der Säule befindenden Kabel überdreht werden. Zur Drehung des Stuhls drehen Sie den Verriegelungshebel einfach ein Stückchen aufwärts nach links. (Abbildung W). Dank der leichtgängigen Kugellagerung geht die Drehung des Stuhls äußerst bequem. Drehen Sie den Hebel wieder rechtsrum zurück, um die Position festzusetzen. Ganz fest drehen ist nicht notwendig, dies könnte sogar zu Beschädigungen führen.

WARNUNG:

Drehen Sie den Stuhl nur, wenn Sie sicher sind, dass er standfest steht, und dass keine Personen oder Gegenstände im Wege stehen. Achten Sie besonders auf hochgeklappte Beinauflagen und/oder eine rückwärts geneigte Rückenlehne.

Falls der Hebel sich mal verdreht haben sollte, so dass die Betätigung für Sie unbequem ist, dann drehen Sie den Hebel fest und ziehen ihn nach außen vom Stuhl weg (Abb. X). Halten Sie den Hebel so fest und drehen Sie ihn in die gewünschte Position. Wenn Sie jetzt den Hebel wieder loslassen, bleibt er in der richtigen Position stehen.

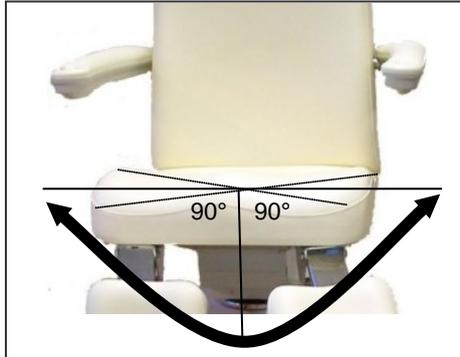


Abbildung V: der Sitz ist nach beiden Seiten um 90° drehbar



Abbildung W: nach links entriegeln, rechts verriegeln

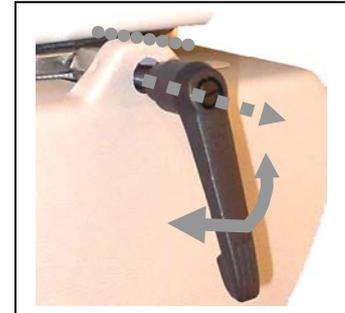


Abbildung X: bei Überdrehung, Hebel ziehen und zurück drehen

3 ALLGEMEINE HINWEISE

3.1 Die Reinigung der Polsters / Desinfektionshinweise

Die durch die Eduard Gerlach GmbH angebotenen Fußpflegestühle werden mit einem durch eine „TOP – Schicht“ beschichtetes Kunstleder angeboten. Diese „TOP – Schicht“ beugt Schäden am Kunstleder gegen die durch die in der Textilindustrie eingesetzten Farbstoffe vor. Leider ist es aber nicht möglich gegen alle in der Textilindustrie zum Einsatz kommenden Farbstoffe, hier insbesondere Naturfarbstoffe, das zum Einsatz gebrachte Kunstleder zu schützen.

Damit Sie trotz allem recht lange Freude an Ihrem Fußpflegestuhl haben ist es notwendig dass Sie bitte folgende Hinweise beachten:

Nur diese hier aufgeführten Mittel sind zur Reinigung / Desinfektion der Fußpflegestühle freigegeben. Es dürfen keine alkoholhaltigen Reinigungs- / Desinfektionsmittel zum Einsatz gebracht werden, da diese die „TOP – Schicht“ zerstören.

Pflege

- Zur Reinigung des Polsters verwenden Sie bitte eine milde Seifenlösung, z.Bsp. mit einer milden Haushaltsseife, und reinigen mit einem feuchten Schwamm.
- Entfernen Sie Flecken vom Polster möglichst bald nach deren Entdeckung, da sie sonst ständig bleiben könnten oder diese die Polsterung angreifen können. Beachten Sie vor allem Flecken von Sonnen, Insektenschutzmittel und Make-up. Versuchen Sie das Reinigungsmittel (Haushaltsseife mit Wasser) zuerst an einer unauffälligen Stelle.
- Verwenden Sie zur Pflege der Polsterung und Verkleidung nur eine Lösung von Haushaltsseife mit Wasser und benutzen Sie einen angefeuchteten Lappen oder bei Bedarf eine weiche Bürste. Anschließend alle Rückstände mit reinem Wasser entfernen und den Stuhl mit einem Handtuch nachtrocknen. Verwenden Sie lauwarmes Wasser und durchtränken Sie die Polsterung nicht.
- Falls die Flecken nicht aus der Polsterung gehen, wenden Sie sich bitte an die Eduard Gerlach GmnH. Verwenden Sie NIEMALS Scheuermittel, Pfannenreiniger, Bleichmittel, oder Lösungsmittel wie Spiritus, Waschbenzin, Aceton, Alkohol, usw. Diese Produkte beschädigen die Polsterung oder die Kunststoffverkleidung.

ACHTUNG: Benutzen Sie niemals andere Reinigungsmittel bzw. Lösungsmittel, da dieses zur Beschädigung der Polsteroberfläche führt.

Desinfektionshinweise

Zur Desinfektion verwenden Sie bitte ausschließlich das Mittel „Mikrobac forte“ (Bestell – Nr.: 314210100), welches Sie entsprechend der Gebrauchsanweisung des Herstellers anwenden.

- ✓ Entfernen Sie Flecken vom Polster möglichst bald nach deren Entdeckung, da sie sonst ständig bleiben könnten oder die Polsterung angreifen. Beachten Sie vor allem Flecken von Sonneneinstrahlung, Insektenschutzmittel und Make-up. Versuchen Sie das Reinigungsmittel (Haushaltsseife mit Wasser) zuerst an einer unauffälligen Stelle.
- ✓ Verwenden Sie zur Pflege der Polsterung und Verkleidung nur eine Lösung von Haushaltsseife mit Wasser und benutzen Sie einen angefeuchteten Lappen oder bei Bedarf eine weiche Bürste. Anschließend alle Rückstände mit reinem Wasser entfernen und den Stuhl mit einem Handtuch nachtrocknen. Verwenden Sie lauwarmes Wasser und durchtränken Sie die Polsterung nicht.
- ✓ Falls die Flecken nicht aus der Polsterung gehen, wenden Sie sich bitte an die Eduard Gerlach GmnH. Verwenden Sie NIEMALS Scheuermittel, Pfannenreiniger, Bleichmittel, oder Lösungsmittel wie Spiritus, Waschbenzin, Aceton, usw. Diese Produkte können die Polsterung oder Kunststoffverkleidung beschädigen.
- ☛ **Seien Sie vorsichtig mit Wasser in der Nähe des elektrischen Fußschalters, und den elektrischen Anschlüssen, und beachten Sie, dass kein Wasser in die Säule gelangt.**
- ☛ **ACHTUNG: Benutzen Sie niemals andere Reinigungsmittel bzw. Lösungsmittel, da dieses zur Beschädigung der Polsteroberfläche führen könnte.**

3.2 Wartung

Obwohl der Stuhl im Prinzip wartungsfrei ist, wird eine Überprüfung in Abständen von zwei Jahren empfohlen. Hierbei sollte der feste Sitz aller Schraubverbindungen überprüft werden. Wenn der Stuhl bei der Bedienung etwas quietscht, kann dieses Problem behoben werden, indem Sie ein wenig dünnes Öl (Nähmaschinenöl) auf die betreffende Stelle geben. Sollte sich dieses Problem nicht beseitigen lassen, erkundigen Sie sich bitte bei der Eduard Gerlach GmbH. Achtung, versuchen Sie niemals selbst, Reparaturen durchzuführen, denn damit erlischt die Garantie.

3.3 Allgemeine Vorsorgemaßnahmen

Die Stühle der S-Serie sind sehr hochwertig und bei der Herstellung wurde besonders auf Langlebigkeit geachtet. Um die Langlebigkeit zu garantieren, ist es notwendig Ihren Fußpflegestuhl gemäß dieser Gebrauchsanweisung zu benutzen und zu pflegen

- Setzen Sie sich NIEMALS auf eine der Beinauflagen. Dies könnte zu ernsthaften Beschädigungen der Stützmechanik des Stuhls führen.
- Sorgen Sie dafür, dass der Stuhl standfest und waagrecht steht. Befestigen Sie ihn im Falle einer Unebenheit am Boden und justieren Sie die Stellfüße. (Dazu Punkt 1.3)
- Stellen Sie nichts auf die Kabel des Fußschalters oder des Netzkabels. Dies könnte zu Kabelbruch oder Funktionsausfall führen.
- Achten Sie beim Senken des Stuhls darauf, dass die Beinauflagen eingeschoben sind. Falls diese den Boden berühren, könnte das zu Beschädigungen führen.
- Achten Sie beim Drehen des Stuhls darauf, dass nichts oder niemand im Wege steht. (Achten Sie besonders auf hochgeklappte und ausgezogene Beinauflagen oder nach hinten geneigte Rückenlehne).

3.4 Technische Daten

In untenstehenden Abbildungen U1 und U2 finden Sie die maximalen und minimalen Abmessungen.

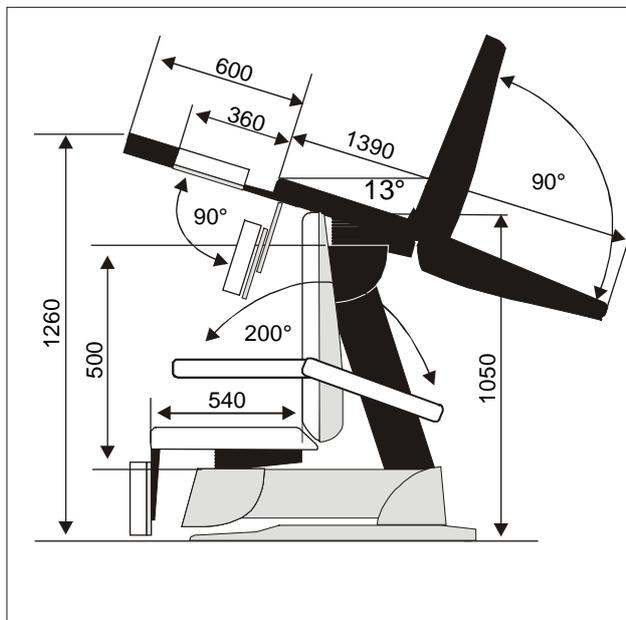


Abbildung U1

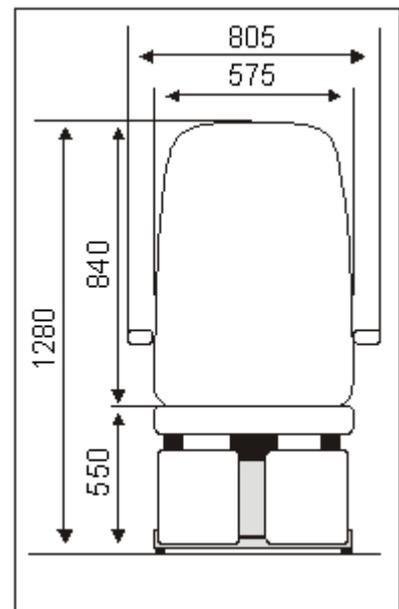


Abbildung U2

Übrige technische Daten

	Standard (230 Volt)
Abmessungen (L x B x H)	178-202 x 80,5 x 55-105 cm
Sitzbreite / Stuhlbreite	57,5 cm / 80,5 cm
Max. Breite (Beinauflagen seitlich)	92 cm
Beinauflagen verlängerbar	± 23 cm
Gewicht	81 kg
Netzbetrieb	AC 220-240V; 50/60 Hz.
Höchstleistungsaufnahme	90 Watt
Gleichmäßige Höchstbelastung (Sitz)	200 kg
Lieferumfang	Fußpflegestuhl S4.2 mit separat mitgelieferten Beinauflagen, am Stuhl montierbarer elektrischer Fußbedienung; Beutel mit Montagewerkzeug (Abbildung E); Netzkabel; Gebrauchsanweisung

Die Entwicklungsabteilung beim Hersteller Dancohr ist ständig auf der Suche nach neuen Technologien und Möglichkeiten. Kleine Abweichungen von den in dieser Bedienungsanleitung benutzten Texten und in der Gestaltung sind deswegen möglich.

Auf dem CE-Typenschild an der hinteren Sockelverkleidung finden Sie die technischen Spezifikationen. Entfernen Sie dieses Schild nicht. Es garantiert Ihnen, dass der Stuhl entsprechend den jüngsten Richtlinien der EU entwickelt und gebaut wurde. Die Angaben sind auch von Bedeutung für die Garantieleistung und falls Sie bei Ihrem Lieferanten Rückfragen haben. Die Garantiefrist beträgt 1 Jahr nach Rechnungsdatum.

Hergestellt in Auftrag von **Eduard Gerlach GmbH - D-32312 Lübbecke - Deutschland - Telefon: 05741-3300**
von © Dancohr Technics Niederlande.


3.5 EU-Konformitätserklärung

Hersteller: Dancohr Technics BV
Anschrift: Marconilaan 8
6003 DD Weert
Niederlande
Anruf: +31 495 434600
Faxabruf: +31 495 434.699
E-Mail: info@dancohr.com

Bestätigt hiermit, dass der Fußpflegestuhl S4.2 (Hersteller-Artikelnummer 75020)

- 1 Den Richtlinien der folgenden Maschinen-Direktiven entsprechen:
2006/42/EG
- 2 Den Richtlinien der folgenden Niederspannungs-Direktiven entsprechen:
2006/95/EC
- 3 Den Richtlinien der folgenden Elektromagnetischen Verträglichkeits-Direktiven entsprechen:
2004/108/EC

Weert Niederlande, 17-09-2013

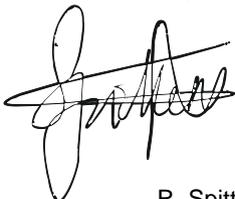

R. Spitters